

## ISTRUZIONI PER INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA (generali)


**MASCHERA CHIRURGICA**  
**Protezione verso esterno**  
 Trattiene le sole **particelle emesse** da chi la indossa.

Non ha la funzione di proteggere il portatore da agenti patogeni esterni;


Utilizzata per evitare che chi la indossa propaghi il virus attraverso starnuti e colpi di tosse;

È più comoda dato che veste in maniera più larga sul volto;


Viene usata per prevenire e limitare il contagio.

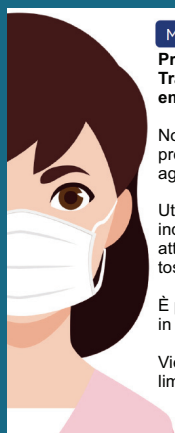


Da sostituire con una nuova quando diventa umida e da non riutilizzare, sono presidi **mono-uso** (salvo ove diversamente indicato)

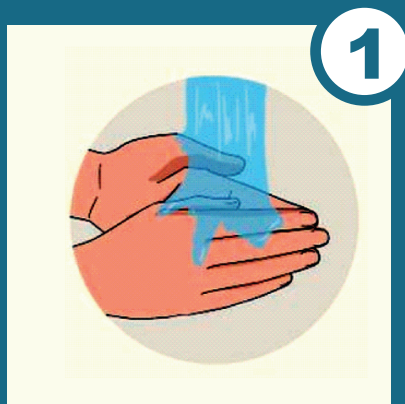


1 Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o usando la soluzione idroalcolica.

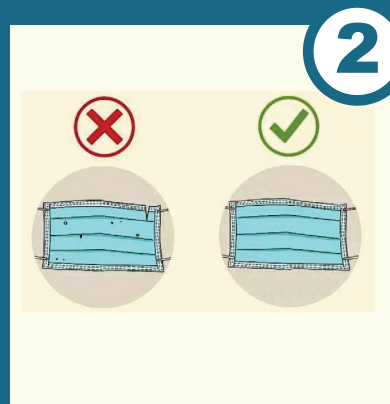

2 Verifica che la mascherina non presenti difetti o segni di usura

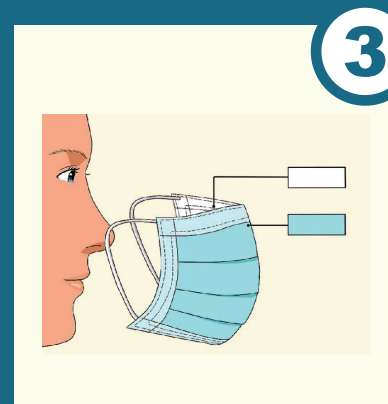


3 Individuare parte interna (bianca) e parte esterna della mascherina (colorata)

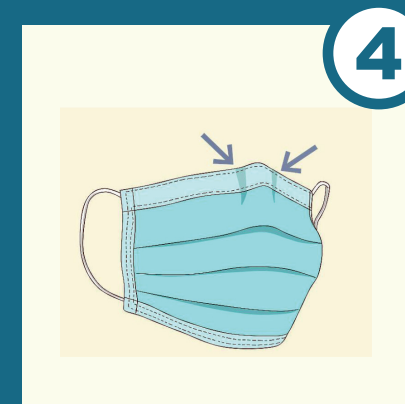


4 Individuare alto e basso della mascherina (la parte alta ha una parte rigida/ferretto)



5 Indossare la mascherina e posizionare gli elastici dietro le orecchie

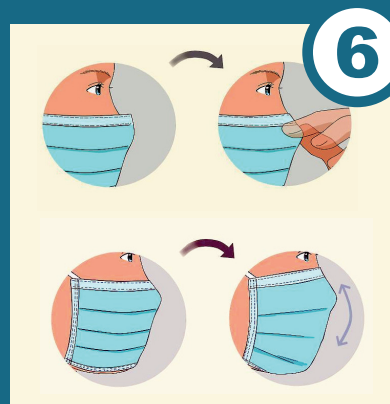

6 Regolare lo stringinaso in modo che la mascherina si conformi alla forma del naso e regolare la mascherina in modo che copra bene naso, bocca e con il bordo inferiore che arrivi sotto al mento.

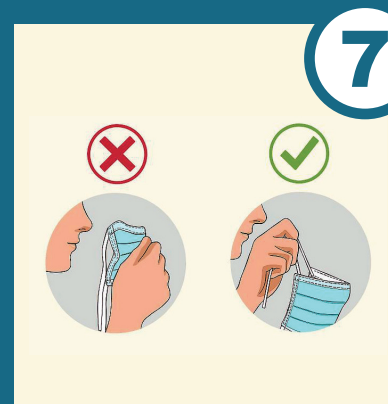

7 Per rimuovere la mascherina, prenderla dagli elastici evitando di toccare la parte filtrante. Gettare negli appositi contenitori.



8 Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o usando la soluzione idroalcolica.